



Como Cuidar Su Prótesis De Silicón

Cuidado Diario De Su Prótesis De Silicón:

- Al usar adhesivo, recomendamos que el adhesivo que “toca” la prótesis sea a base de agua. A veces, este es el único adhesivo necesario, pero cuando se necesita un adhesivo mas fuerte, se puede colocar un adhesivo adicional a base de silicona en la parte superior del adhesivo a base de agua.
- Adhesivos a base de agua (**¡NO CONGELAR!**) Estos adhesivos se aplican una capa delgada a la vez, generalmente con un cotonee de algodón, y se dejan secar. Al aplicarlo se vera de color blanco y una vez seco quedara transparente. Se puede aplicar mas de una capa.
- Daro Hydro Bond #B-200-30: El mas fuerte de los adhesivos a base de agua. Puede usarse solo si no se usa en un ambiente “húmedo”.
- Este adhesivo se puede usar en capas sobre la prótesis. Al limpiar la prótesis, remoje en una taza de agua tibia del grifo durante un par de minutos. Esto aflojará el adhesivo a base de agua, y luego todo el adhesivo se deslizará de manera similar a una pequeña costra.
- Practique colocando su prótesis sin ningún adhesivo (o muy poco). Al retirar la prótesis, limpie solo lo que este sucio y deje la capa restante. Solo elimine todas las capas adhesivas después de 2-4 días de acumulación. Entonces será mas fácil de eliminar. Para aplicar nuevo adhesivo repita el proceso.
- Para limpiar el resto de la prótesis, use agua y jabón suave y un cotonee.

Como con todas las prótesis, manténgase alejado de los animales, evita fumar, la exposición prolongada a la luz solar y evite los solventes. Retirar por la noche y mantener la piel limpia. Su prótesis esta hecha de silicón de grado medico, pero tiene bordes delgados que puedan romperse si no se manejan con cuidado. No se recomienda nadar en océanos, lagos y ríos y **NO use súper pegamento**. Inicialmente, debe usar la prótesis diariamente, a menos que surjan problemas. Si la suya es una prótesis retenida con adhesivo, practique colocar la prótesis sin adhesivo antes de la aplicación. Asegurase de que su piel este limpio y sin aceite. Algunas prótesis son difíciles de colocar y puede requerir algo de practica. No se desanime si pasa un par de semanas antes de poder aplicar la prótesis con cierta facilidad. Si tiene zonas con dolor o molesta, deje de usar la prótesis y llame a esta oficina. Una prótesis facial es un dispositivo pasivo, que no debe causar dolor ni puntos de presión.